



FUTURO™ DUIMSTABILISATOR

45841-42

 **MATIGE
STEUN**



**ADEMENDE
MATERIALEN**

Beoogd gebruik: Ondersteunt een stijve, zwakke of geblesseerde duim.

Samenstelling: Urethaanschuim, Polyester, Elastaan, Plastic (Polyacetaal), Nylon.
Stop het gebruik en raadpleeg een arts bij ongemak of pijn, of als de pijn/het ongemak aanhoudt of verergert.
3M en FUTURO zijn handelsmerken van 3M.

**Ondersteunt en stabiliseert pijnlijke,
zwakke of geblesseerde duimen.**

IDEAAL VOOR:

Dagelijkse activiteiten, algemene ondersteuning en knutselen.

HOOFDKENMERKEN:


- 1 Twee steunen voor duimstabiliteit.
- 2 Verstelbare polsriem voor extra ondersteuning.
- 3 Ongehinderde bewegingsvrijheid voor de overige vingers.

MAAT:




Referentie	CNK	Maat	CM
45841	2403558	S/M	Duim: 5.1-6.4 Pols: 12.7-19.1
45842	2403541	L/XL	Duim: 6.4-7.6 Pols: 17.8-22.9


DRAAGINSTRUCTIES:

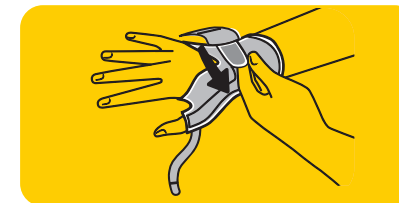

Open alle klittenbandsluitingen en schuif uw duim in het duimgat. Wikkel de stabilisator om de hand en maak de sluitingen bij de polsbasis vast.

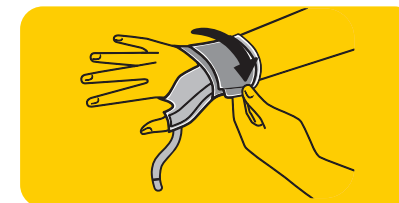

Wikkel de lange riem om de pols en maak deze vast. Verstel beide sluitingen totdat de stabilisator strak maar comfortabel zit.

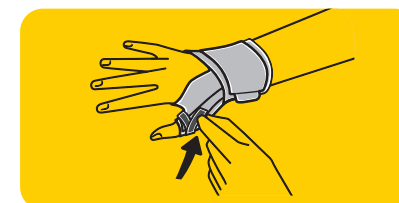

Wikkel en bevestig de duimriem rondom de duim voor een betere pasvorm, of rondom de duimbasis voor extra stabiliteit.

U kunt de steunen verstellen voor de aanbevolen houding of helemaal verwijderen voor gemiddelde ondersteuning.

3M Belgium bvba/sprl
Afd. Consumer Health Care
www.3M.BE/futuro

3M Nederland B.V.
Afd. Consumer Health Care
www.3M.NL/futuro

3M