

clinell™

HEXI HUB



Top 10 boodschappen van HEXI HUB

CA2C240 - Groen

1

Afzonderlijk verpakte doekjes voor eenmalig gebruik

Geregistreerd als medisch hulpmiddel van klasse IIa voor de desinfectie van niet-invasieve medische hulpmiddelen.

2

Meerdere toepassingen

Geschikt voor gebruik op intraveneuze hubs, poorten, kraantjes en dopjes van hemocultuurflesjes.

3

Het doekje bevat 2% chloorhexidinedigluconaat in 70% isopropylalcohol

Gebruiken in combinatie met uw lokaal beleid inzake persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

4

Gebruiksklaar en gebruiksvriendelijk formaat

Eenvoudige openscheurverpakking.

5

Snelwerkend

Het voordeel van een snelle antimicrobiële werking en een uitstekende residuele activiteit.

6

Snel en doeltreffend

Bewezen werkzaamheid tegen verschillende micro-organismen, waaronder *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*, *Pseudomonas aeruginosa* en *Candida albicans*.

7

Vermindert infecties

Uit onderzoek is gebleken dat het gebruik van vasculaire kathetergerelateerde bloedbaaninfecties met 75%^{1,2} kan verminderen.

8

Naleving

Ondersteunt richtlijnen voor het voorkomen van infecties die verband houden met het onderhoud van hubs en poorten, zoals NICE³ [CG139] en EPIC^{3,4}.

9



Draag de juiste PBM.



Scheur het zakje open, verwijder het doekje en vouw het uit.



Wrijf gedurende minimum 15 seconden.



Gooi het gebruikte doekje weg in het daarvoor bestemde afvalrecipiënt.

10



Draag de juiste PBM.



Scheur het zakje open, verwijder het doekje en vouw het uit.



Verwijder de bovenkant en veeg de dop van de fles gedurende minimum 15 seconden af alvorens bloed in te brengen.



Gooi het gebruikte doekje weg in het daarvoor bestemde afvalrecipiënt.

Hoe te gebruiken - bloedkweekflessen

1. Soothill JS, Bravery K, Ho A, Macqueen S, Collins J, Lock P. A fall in bloodstream infections followed a change to 2% chlorhexidine in 70% isopropanol for catheter connection antisepsis: a pediatric single center before/after study on a hemopoietic stem cell transplant ward. *Am J Infect Control*. 2009;37(8):626-630. doi:10.1016/j.ajic.2009.03.014.
2. Pichler J, Soothill J, Hill S. Reduction of blood stream infections in children following a change to chlorhexidine disinfection of parenteral nutrition catheter connectors. *Clin Nutr*. 2014;33(1):85-89. doi:10.1016/j.clnu.2013.03.021.
3. *Healthcare-associated infections: prevention and control in primary and community care*. London: National Institute for Health and Care Excellence (NICE); February 2017.
4. Loveday HP, Wilson JA, Pratt RJ, et al. epic3: national evidence-based guidelines for preventing healthcare-associated infections in NHS hospitals in England. *J Hosp Infect*. 2014;86 Suppl 1:S1-S70. doi:10.1016/S0195-6701(13)60012-2